

LV Latviski

1.1 Nosaukums / Apraksts

Diviniti Ocean Fresh

Jauns multifunkcionāls šķīdums ar nātrija hialuronātu un hidroksipropilmetilcelulozi (HPMC) citrāta buferšķīdumā visu veidu mīksto kontaktlēcu dezinfekcijai, uzglabāšanai, skalošanai un mitrināšanai. Tas atdala proteīnus un ir ieteicams jutīgām acīm.

NESATUR FOSFĀTUS

1.1 Īpašības un indikācijas

Multifunkcionālais šķīdums *Diviniti Ocean Fresh* spēj efektīvi dezinficēt, saglabāt, mitrināt un attīrīt kontaktlēcas.

Jaunums! Šķīdums satur augu izcelsmes celulozes šķiedras HPMC, kas ir īpaši veidotas, lai palielinātu to šķīdību ūdenī, radot drošu nejonisku hidrofilu polimēru ar plašu iedarbības spektru. Sinerģijā ar hialuronskābi tas palīdz uzlabot kontaktlēcu mitrināšanos un to viskozi-elastīgās īpašības.

Diviniti Ocean Fresh lieliski mitrina kontaktlēcas jau uzreiz pēc to ielikšanas šķīdumā un arī visas dienas garumā kontaktlēcu lietošanas laikā, tā nodrošinot ilgstošu komfortu, samazinot acu sausumu un kairinājumu.

STERILE A

1.2 Lietošanas instrukcija

- Rūpīgi nomazgājiet rokas un noslaukiet tās ar tīru drānu.
- Izņemiet kontaktlēcu no acs un uzlieciet to uz plaukstas, uzlejot tik daudz *Diviniti Ocean Fresh* šķīduma, lai lēca būtu pilnībā samitrināta.
- Ar otras rokas pirkstu maigi paberziet ar “turp un atpakaļ” kustībām abas lēcas virsmas 10-15 sekundes.
- Rūpīgi un bagātīgi noskalojiet lēcu ar *Diviniti Ocean Fresh*, lai noņemtu visus nosēdumus. Piepildiet kontaktlēcu konteineri ar *Diviniti Ocean Fresh* šķīdumu līdz atzīmei uz tā.
- Rūpīgi aizskrūvējiet konteineri un atstājiet lēcas iegremdētas šķīdumā vismaz 2–3 stundas vai visu nakti.
- Pirms lēcu lietošanas noskalojiet tās ar *Diviniti Ocean Fresh* šķīdumu.

1.3 Kontrindikācijas:

Nav noteiktu kontrindikāciju, izņemot alerģiju vai specifisku paaugstinātu jutību pret kādu no tā sastāvdaļām.

1.4 Piesardzības pasākumi un brīdinājumi:

Kad *Diviniti Ocean Fresh* tiek atvērts, tas ir jāizlieto 3 mēnešu laikā. Atlikušais šķīdums ir jāiznīcina. Nelietot šķīdumu, ja ir bojāts pudeles blīvējums, jo tad nevar tikt garantēta produkta sterilitāte. Lai izvairītos no piesārņojuma, nepieļaujiet pudeles gala saskari ne ar kādu virsmu. Pēc produkta lietošanas parliecinieties, ka pudele ir labi aiztaisīta. Glabājiet pudeli no karstuma pasargātā vietā, kuras temperatūra nepārsniedz 30°C.

Nelietojiet šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām. ⏰

Kontaktlēcām, kas 3-4 nedēļas ir glabājušās *Diviniti Ocean Fresh* šķīdumā, pirms to lietošanas veiciet dezinfekciju vismaz 5-7 minūtes, vispirms izlejot veco šķīdumu no konteinerā.

Nelietojiet šķīdumu īpašas acu jutības gadījumā pret kādu no tā sastāvdaļām.

Uzglabājiet šķīdumu bērniem nepieejamā vietā.

Izmantojiet vienmēr svaigu šķīdumu, vispirms atbrīvojoties no tā, kas ir palicis lēcu uzglabāšanas konteinerā.

Neaizvietojiet *Diviniti Ocean Fresh* ar citu dezinfekcijas līdzekli.

Nekad neizmantojiet krāna ūdeni mīkstajām kontaktlēcām.


Nepārejošu problēmu vai kairinājuma gadījumā pārtrauciet šķīduma lietošanu un konsultējieties ar speciālistu.

1.5 Sastāvs:








Poliheksametilēna biguanīds 0.0002%; dinātrija edatāts 0.01%; nātrija hialuronāts 0.025%;

HPMC (hidroksipropilmetilceluloze) 0.04%, citrāta buferšķīdums, izgatavots no attīrīta ūdens ar palīgvielām.




Revisione 00 ed_2024 Data 25/01/2024

Elaborato PRRC 	Verificato MQA	Approvato GM
---	----------------	--------------

2 SYMBOLS / SIMBOLI / SIMBOLIAI / SÜMBOLID

			LOT
			

3 REVISED / PĀRSKATĪTS / PERŽIŪRĒTA / REDAKTSIOONID

 ESOFORM s.r.l. Laboratorio Chimico Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo - Italia	 0425	REV. NN DEL 25/01/2024		Codice Astuccio
---	--	---	---	-----------------